

CROS/BiCROS

Guide




signia-pro.dk

Hearing
Systems

SIEMENS

Guide til Signia CROS/BiCROS.


- 1 CROS Pure apparatet skal ikke tilsluttes Connexx.
- 2 Forbind det Signia primax apparat (Pure, Motion, Insio), der skal på det gode øre, med Connexx.
- 3 Når apparatet er detekteret ses følgende billede i Connexx. Vælg om CROS eller BiCROS funktion ønskes.

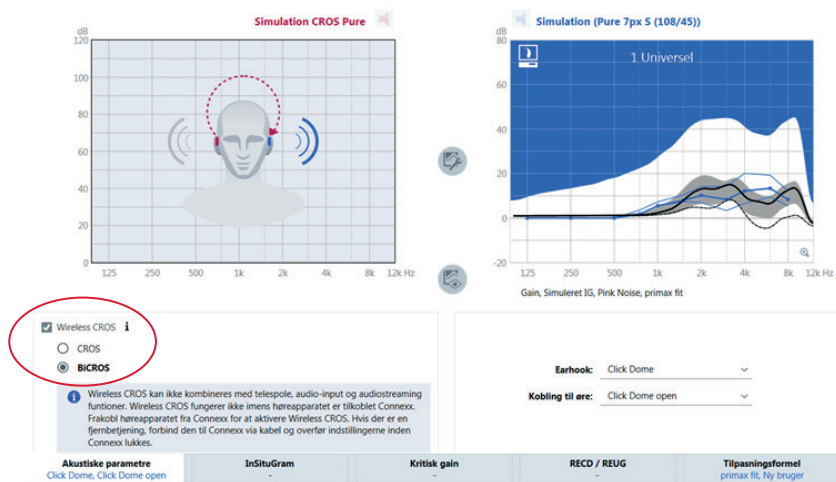

- 4 Tilpas nu apparatet som en monaural tilpasning. Tilføj evt. programmer mm.
- 5 Efter endt tilpasning, frakobles høreapparatet Connexx.
- 6 Apparatet sættes på patientens øre og tændes. Startmelodien afspilles.
- 7 CROS Pure apparatet sættes på modsatte øre og tændes. Startmelodien afspilles igen. Denne gang for at indikere at CROS Pure er tændt og tilkoblet.
- 8 Tilpasningen er nu afsluttet. HUSK at du i Connexx kan ændre styrken på signalet fra mikrofonenheden, så den passer til brugerens behov.


CROS/BiCROS.

CROS

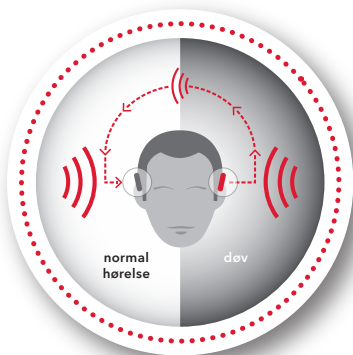

Normal hørelse på det ene øre.
Døv på det andet øre.

BiCROS

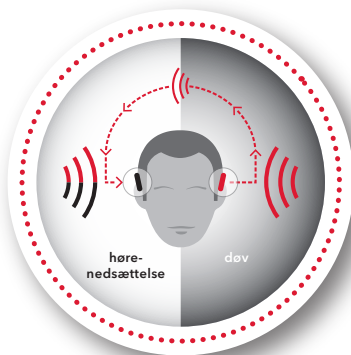

Høre-nedsættelse på det ene øre.
Døv på det andet øre.



- Optimerede retningsmikrofoner
- Lav egenstøj
- Batteridræn:
 - 8 dage for CROS Pure*
 - 7 dage for Pure primax*
- Auto Pairing
- Volumekontrol
- Kan bruges med alle primax e2e apparater

* baseret på 16 timers brug i hverdagen. Separat batteri alarm for CROS Pure

Signia CROS/BiCROS.

CROS Pure kan bruges til CROS / BiCROS tilpasninger sammen med alle primax apparater: Pure primax, Motion primax og Insio primax



Legal Manufacturer

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Phone +49 9131 308 0

Sivantos A/S

Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
www.signia-pro.dk

eur0067/1/800/0916 | Printet i Danmark

© 09.2016 Signia GmbH

Varemærket Siemens bruges af Sivantos A/S i henhold til licensaftale med Siemens AG.