

signia

# Pure Charge&Go Nx

Brugsanvisning



# Indhold

<b>Velkommen</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>Dine høreapparater</b>	<b>5</b>
<hr/>	
Apparattype	5
Lær dine høreapparater at kende	6
Dele og betegnelser	7
Brugerkontroller	9
Lytteprogrammer	10
Funktioner	10
<b>Daglig brug</b>	<b>11</b>
<hr/>	
Opladning	11
Tænd og sluk	12
Skift til standby-tilstand	13
Anbring og fjern høreapparaterne	14
Justering af lydstyrken	18
Sådan skiftes lytteprogrammet	18
Yderligere justeringer (tilvalg)	19
<b>Særlige lyttesituationer</b>	<b>20</b>
<hr/>	
Brug af telefon	20
Lydstreaming med iPhone	21
Flytilstand	21

<b>Vedligeholdelse</b>	<b>22</b>
Høreapparater	22
Ørepropper	24
Professionel vedligeholdelse	26
<b>Vigtige sikkerhedsoplysninger</b>	<b>27</b>
<b>Yderligere oplysninger</b>	<b>29</b>
Sikkerhedsoplysninger	29
Tilbehør	29
Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser	30
Information vedrørende bortskaffelse	31
Symboler anvendt i dette dokument	31
Fejlfinding	32
Service og garanti	33

# Velkommen

Tak, fordi du har valgt vores høreapparater som din ledsager i dagligdagen. Som det gælder alle nye ting, vil det tage nogen tid at blive fortrolig med dem.

Denne vejledning vil, sammen med eventuel hjælp fra din høreapparatspecialist, hjælpe dig med at forstå de fordele og den forbedrede livskvalitet, dine høreapparater kan give dig.

For at du kan få mest muligt ud af dine høreapparater, anbefales det, at du bærer dem hele dagen, hver dag. Det vil gøre det nemmere for dig at vænne dig til dem.



## **FORSIGTIG**

Det er vigtigt at læse denne brugsanvisning samt sikkerhedshåndbogen grundigt og fuldstændigt. Følg sikkerhedsoplysningerne for at undgå beskadigelse eller personskader.



Lad høreapparaterne helt op, inden du anvender dem første gang. Følg instruktionerne i opladerens brugsanvisning.

# Dine høreapparater



Denne brugervejledning beskriver ekstra funktioner, dine høreapparater muligvis har.

Bed din høreapparatspecialist om at markere de funktioner, der er relevante for dine høreapparater.

## Apparattype

Dine høreapparater er en RIC-model (Receiver-in-Canal eller på dansk: højtaler i øret). Højtaleren er anbragt i øregangen og er forbundet med høreapparatet via en højtalerforbindelse. Apparaterne er ikke beregnet til børn under 3 år eller til personer med en udviklingsalder på under 3 år.

Der er fast indbygget en ladebattericelle (genopladeligt litium-ion-batteri) i dit høreapparat. Dette gør det nemt at lade op med vores induktive oplader.

Den trådløse funktionalitet muliggør avancerede lydfunktioner og synkronisering mellem dine to høreapparater.

Dine høreapparater har Bluetooth® low energy\* teknologi giver mulighed for nem udveksling af data med din smartphone og problemfri lydstreaming med din iPhone\*\*.

\* Bluetooth ordmærket og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af den juridiske producent af dette produkt sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

\*\* iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc., og er registreret i U.S.A. og andre lande.


## Lær dine høreapparater at kende

Det anbefales, at du bruger lidt tid på at lære dine høreapparater at kende. Med apparaterne i hånden kan du prøve brugerkontrollerne og bemærke dig deres placering på høreapparaterne. Dette vil gøre det lettere for dig at føle og trykke på brugerkontrollerne, når du bærer høreapparaterne.

**i**

Hvis du har problemer med at trykke på knapperne på høreapparaterne, mens du har dem på, kan du spørge din høreapparatspecialist, om det er muligt at bruge en fjernbetjening eller en smartphone-app for at betjene dine høreapparater.

## Dele og betegnelser

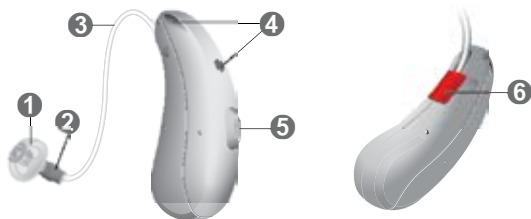





- 
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ① Øreprop             | ⑤ Trykknop (brugerkontrol, on/off-kontakt)                                  |
| ② Højtaler            |   |
| ③ Højtalerforbindelse | ⑥ Sideangivelse (rød = højre øre, blå = venstre øre) og højtalerforbindelse |
| ④ Mikrofonåbninger    |   |
-

Du kan anvende standard eller personlige ørepropper:



### Standardørepropper

### Størrelse

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <input type="radio"/> |  | Click Sleeve<br>(ventileret eller lukket) |
| <input type="radio"/> |  | Click Dome™ enkelt<br>(åben eller lukket) |
| <input type="radio"/> |  | Click Dome halvåben                       |
| <input type="radio"/> |  | Click Dome dobbelt                        |

Du kan let udskifte standardørepropperne. Læs mere i afsnittet "Vedligeholdelse".

### Personlige ørepropper

- |                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| <input type="radio"/> |    | Personlig skal |
| <input type="radio"/> |  | Click Prop     |



## Brugerkontroller

Du kan f.eks. skifte lytteprogram med trykknappen.  
Din høreapparatspecialist har indstillet dine ønskede funktioner til trykknappen.

<b>Trykknap-funktion</b>	<b>L</b>	<b>R</b>
<b>Kort tryk:</b>		
Program op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke for tinnitusignal op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke for tinnitusignal ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV stream til/fra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Tryk i ca. 2 sekunder:</b>		
Program op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke for tinnitusignal op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke for tinnitusignal ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV stream til/fra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktivere/deaktivere flytilstand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Tryk i mere end 3 sekunder:</b>		
Tænd og sluk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = Venstre, R = Højre



Du kan også bruge en fjernbetjening til at ændre lytteprogrammer eller justere lydstyrken i dine høreapparater. Du har endnu flere kontrolmuligheder med vores smartphone-app.

## Lytteprogrammer

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Læs mere i afsnittet "Sådan skiftes lytteprogrammet".

## Funktioner



**Tinnitusbehandlingsfunktionen** udsender en behagelig lyd, som afleder din opmærksomhed fra din tinnitus.

# Daglig brug

## Opladning

Sæt dine høreapparater i opladeren.

- ▶ Følg instruktionerne i opladerens brugsanvisning. Du kan også finde gode tips angående opladning i opladerens brugsanvisning.



### Indikation af lavt strømniveau

Du hører et alarmsignal, der angiver, at ladecellen er ved at være flad. Signalet gentages hvert 15. minut. Afhængigt af brugen af dine høreapparater har du ca. 1,5 time til at oplade dine høreapparater, før de holder op med at virke.

### Udskiftning af ladecellen

Hvis de fuldt opladede høreapparater ikke kan holde til en hel dags brug (16 timers normal brug uden audio-streaming), anbefaler vi at få ladecellen udskiftet hos din høreapparatspecialist.

## Tænd og sluk

Du kan tænde og slukke for dine høreapparater på følgende måder.

Via oplader:

- ▶ Tænd: Tag apparaterne ud af opladeren.  
Opstartsmelodien afspilles i dine høreapparater.  
**Standard**-lydstyrken og -lytteprogrammet indstilles.
- ▶ Sluk: Sæt høreapparaterne i opladeren.

Bemærk, at opladeren skal være tilsluttet til strømforsyningen. Se opladerens brugsanvisningen for yderligere oplysninger.

Via trykknop:

- ▶ Tænd: Tryk på trykknappen og hold den trykket nede i flere sekunder, indtil opstartsmelodien afspilles. Slip trykknappen, mens opstartsmelodien afspilles.  
**Standard**-lydstyrken og -lytteprogrammet indstilles.
- ▶ Sluk: Tryk på knappen i flere sekunder. Afhængigt af trykknappens indstillinger kan der afspilles signallyde, før høreapparatet slukkes.

Se også tips angående opladning i opladerens brugsanvisning.

## Skift til standby-tilstand

Du kan sætte dine høreapparater på standby via fjernbetjening eller smartphone-app. Dette slukker for høreapparaternes lyd. Når du lukker standby-tilstanden, indstilles den **tidligere** anvendte lydstyrke og lytteprogrammet igen.

Bemærk:

- I standby-tilstand er høreapparaterne **ikke** slukket helt. De forbruger stadig en lille smule strøm.  
Derfor anbefaler vi kun at anvende standby i en kort periode.
- Hvis du vil aktivere høreapparaterne igen, men fjernbetjeningen eller appen ikke er ved hånden: Sluk for høreapparaterne, og tænd dem derefter igen (med trykknappen eller ved at sætte dem kortvarigt i opladeren, indtil en eller flere orange LED'er begynder at lyse). I dette tilfælde indstilles **standard**-lydstyrken og -lytteprogrammet.

## Anbring og fjern høreapparaterne

Dine høreapparater er indstillet til dit højre og venstre øre. Farvemærkningerne angiver siden:


- rød markering = højre øre
- blå markering = venstre øre




Isæt høreapparatet:

- ▶ I forbindelse med Click Sleeves skal man være opmærksom på, at den buede del af Click Sleeve følger højttalerforbindens buede del.

Rigtigt:

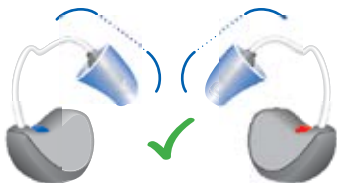

Forkert:

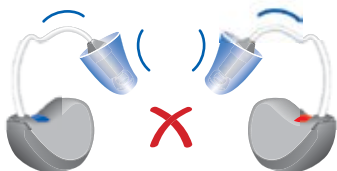


- ▶ Hold højtalerforbindelsen i den buede del, tættest ved øreproppen.
- ▶ Tryk forsigtigt øreproppen ind i øregangen ①.

- ▶ Drej den let, indtil den sidder godt.

Åbn og luk munden for at undgå, at der ophobes luft i øregangen.

- ▶ Løft høreapparatet op over øret ②.

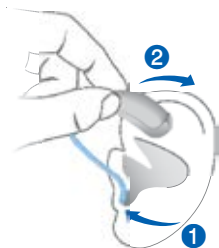

### FORSIGTIG

Risiko for skader!

- ▶ Sæt øreproppen omhyggeligt, og ikke for dybt, i øret.



- Det kan muligvis hjælpe at sætte **højre** høreapparat i med **højre** hånd og **venstre** høreapparat med **venstre** hånd.
- Hvis du har problemer med at sætte øreproppen i, kan du bruge den anden hånd til forsigtigt at trække øreflippen nedad. Det vil åbne øregangen og gøre det lettere at sætte øreproppen i.

Concha-låsen hjælper med at holde øreproppen på plads i øret. Sådan anbringes concha-låsen:


- ▶ Bøj concha-låsen og anbring den forsigtigt nederst i øret (se billedet).





Fjern høreapparatet:

- ▶ Løft høreapparatet og placer det foran øret **1**.
- ▶ Hvis dit høreapparat er udstyret med en personlig skal eller en Click Prop, fjerner du den ved at trække den lille udtrækssnor bagud.

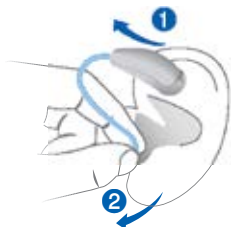

- ▶ Ved alle andre ørepropper: Tag fat i højtaleren i øregangen med to fingre og træk den forsigtigt ud **2**.  
Træk ikke i højtalerforbindelsen.



### **FORSIGTIG**

Risiko for skader!

- ▶ I meget sjældne tilfælde kan øreproppen blive siddende i øret, når du tager høreapparatet af. Sker dette, skal du få den fjernet hos en læge.

Rengør og aftør høreapparaterne efter brug. Læs mere i afsnittet "Vedligeholdelse".

## **Justering af lydstyrken**

Dine høreapparater justerer automatisk lydstyrken efter lyttesituationen.

- ▶ Hvis du foretrækker at justere lydstyrken manuelt, skal du trykke på knappen.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af din trykknop.

Et signal kan indikere en ændring i lydstyrken. Så snart maks. eller min. lydstyrken er nået, vil du muligvis høre et lydsignal.

## **Sådan skiftes lytteprogrammet**

Høreapparaterne tilpasser automatisk deres lyd afhængig af lyttesituationen.

Dine høreapparater kan også have flere lytteprogrammer, hvormed du kan ændre lyden efter behov. Et lydsignal kan indikere programændringen.

- ▶ Du ændrer lytteprogrammet ved at trykke kortvarigt på trykknappen.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af dine brugerkontroller. Der henvises til afsnittet "Lytteprogrammer" vedrørende en liste med dine lytteprogrammer.

Standardlydstyrken anvendes.

## **Yderligere justeringer (tilvalg)**

Knapperne på dine høreapparater kan også bruges til at ændre på f.eks. niveauet for tinnitusbehandlingssignalet.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af dine brugerkontroller.

# Særlige lyttesituationer

## Brug af telefon

Når du taler i telefon, skal du holde telefonen lige over dit øre. Høreapparatet og telefonen skal være tæt på hinanden. Drej telefonen en smule, så øret ikke er helt dækket.



## Telefonprogram

Du foretrækker muligvis et bestemt lydniveau, når du taler i telefon. Bed din høreapparatspecialist om at indstille et telefonprogram.

- ▶ Skift til telefonprogrammet, når du taler i telefon.  
Det er angivet i afsnittet "Lytteprogrammer", om et telefonprogram er indstillet til dine høreapparater.

## Lydstreaming med iPhone

Dine høreapparater er **Made for iPhone**-høreapparater. Dette betyder at du kan bruge dine høreapparater til at modtage telefonopkald og lytte til musik direkte fra din iPhone.

For flere oplysninger om kompatible iOS-enheder, parring, lydstreaming og andre nyttige funktioner bedes du kontakte din høreapparatspecialist.

## Flytilstand

I områder hvor brugen af Bluetooth-teknologi ikke er tilladt (f.eks. på visse fly) kan du aktivere flytilstand. Dette slukker midlertidigt for Bluetooth i dine høreapparater. Høreapparaterne fungerer stadig uden Bluetooth, men direkte lydstreaming vil ikke være muligt og andre funktioner vil ikke være tilgængelige.

- For at aktivere/deaktivere flytilstand skal du bruge smartphone-appen eller bruge høreapparaternes kontrolelementer.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" for flere oplysninger.

Aktivering og deaktivering af flytilstand indikeres med en advarselstone.

# Vedligeholdelse

For at undgå beskadigelse er det vigtigt at passe godt på høreapparaterne og overholde nogle få grundregler, men de bliver hurtigt en vane.

## Høreapparater

### Rengøring

Dine høreapparater har en beskyttende belægning. Hvis de ikke rengøres jævnlgt, kan du dog beskadige dine høreapparater eller forårsage personskader.

- ▶ Rengør dine høreapparater dagligt med en blød, tør klud.
- ▶ Brug aldrig rindende vand, og kom aldrig apparaterne i vand.
- ▶ Tryk aldrig på apparaterne, når du rengør dem.
- ▶ Spørg din høreapparatspecialist efter anbefalede rengøringsprodukter, særlige vedligeholdelsessæt eller yderligere oplysninger om, hvordan du holder dine høreapparater i god stand.



### Tørring

Din oplader tørrer høreapparaterne, mens de oplades. Du kan også bruge almindelige produkter til at tørre dine høreapparater. Spørg din høreapparatspecialist om anbefalede tørreprodukter og individuelle instruktioner om, hvordan du tørrer dine høreapparater.

## Opbevaring

- Kortvarig opbevaring (op til flere dage): Sluk for dine høreapparater med trykknappen, eller sæt dem i opladeren med tilsluttet strøm.

Opladeren skal være tilsluttet til strømforsyningen. Hvis opladeren ikke er tilsluttet til strømforsyningen, og du sætter høreapparaterne i opladeren, slukkes høreapparaterne **ikke**.

Vær opmærksom på, at når du slukker høreapparaterne med en fjernbetjening eller smartphone-app, er høreapparaterne **ikke** helt slukkede. De er på standby og forbruger stadig en smule strøm.

- Langvarig opbevaring (uger, måneder...): Lad først dine høreapparater fuldt op. Sluk for dem på trykknappen, før de skal opbevares. Vi anbefaler at anvende tørreprodukter under opbevaringen af høreapparaterne.

Oplad dine høreapparater i intervaller på 6 måneder for at undgå, at ladecellen aflades for kraftigt. Kraftigt afladte ladeceller kan ikke oplades igen, og de skal udskiftes. Vi anbefaler at genoplade hyppigere end intervaller på 6 måneder.

Overhold opbevaringsbetingelserne i afsnittet "Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser".

## Ørepropper


### Rengøring

Der kan samle sig ørevoks på ørepropperne. Det kan påvirke lyd kvaliteten. Rengør ørepropperne dagligt.

For alle typer ørepropper:


- Rengør øreproppen med en blød og tør klud umiddelbart efter, at du har fjernet øreproppen fra øret.

Dette vil forhindre, at ørevoksen tørrer og bliver hård.

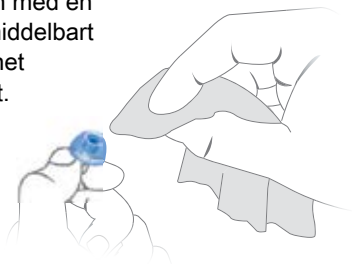

Til Click Domes eller Click Sleeves:

- Klem spidsen på øreproppen.

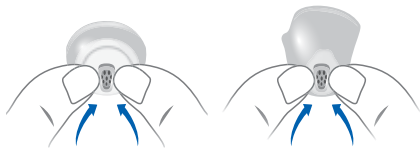




## Udskiftning

Udskift almindelige ørepropper ca. hver 3. måned. Udskift dem tidligere, hvis de får revner eller andre forandringer. Proceduren for udskiftning af almindelige ørepropper afhænger af deres type. I afsnittet "Dele og betegnelser" har din høreapparatspecialist markeret den type øreprop, du har.

### Udskiftning af Click Domes

- ▶ For at fjerne den gamle Click Dome kan du bruge afmonteringsværktøjet eller følge instruktionerne på emballagen til Click Domes. Pas på ikke at trække ikke i højttalerforbindelsen.

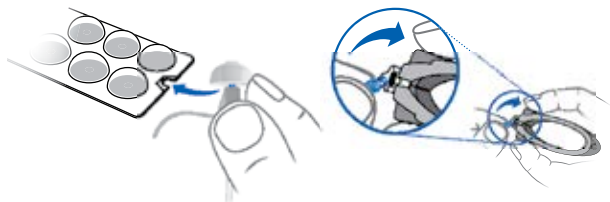

### Afmonteringsværktøjet fås som tilbehør.

- ▶ Vær særlig omhyggelig med at den nye Click Dome klikker på plads.
- ▶ Kontrollér, at den nye Click Dome sidder sikkert fast.



## Udskiftning af Click Sleeves

- ▶ Vend Click Sleeve med vrangen udad.
- ▶ Tag fat i Click Sleeve og højtaleren (ikke højtalernes ledning) med dine fingre og træk Click Sleeve af.
- ▶ Vær særligt omhyggelig med at den nye Click Sleeve klikker på plads.



## Professionel vedligeholdelse

Din høreapparatspecialist kan udføre en grundig, professionel rengøring og vedligeholdelse.

Personlige ørepropper og ørevoksfiltere bør udskiftes efter behov af en høreapparatspecialist.

Bed din høreapparatspecialist om at få individuel anbefaling af vedligeholdelsesintervaller samt anden hjælp.

# Vigtige sikkerhedsoplysninger

Dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger angående ladezellen. For yderligere sikkerhedsoplysninger henvises der til sikkerhedsoplysningerne, der leveres sammen med høreapparaterne.



## ADVARSEL

Der er fast indbygget en lade celle (genopladeligt litium-ion-batteri) i dit høreapparat. Forkert brug af lade cellen eller høreapparatet kan medføre, at lade cellen går i stykker.

Risiko for kvæstelser, brand eller eksplosion!

- ▶ Følg sikkerhedsanvisningerne for lade cellerne i dette afsnit.
  
- ▶ Overhold driftsbetingelserne. Se afsnittet "Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser"
- ▶ Vær særlig opmærksom på at beskytte dine høreapparater mod ekstrem varme (f.eks. ild, mikrobølgeovne, induktionsovne eller andre felter med kraftig induktion) og sollys.
- ▶ Oplad kun dine høreapparater med den godkendte oplader. Spørg evt. din høreapparatspecialist om hjælp.
- ▶ Lade cellen må ikke skilles ad.

Udskiftning og reparation skal udføres af en specialist.  
Derfor:

- ▶ Reparér eller udskift ikke ladecellen selv.
- ▶ Brug ikke høreapparaterne, hvis deres ydeevne reduceres betydeligt efter opladning.
- ▶ I det usandsynlige tilfælde af, at ladecellen springer eller eksploderer, skal alle brandbare dele holdes væk.

Hvis nogen af de ovennævnte situationer optræder, skal du levere dine høreapparater tilbage til din høreapparatspecialist.

# Yderligere oplysninger

## Sikkerhedsoplysninger

For yderligere sikkerhedsoplysninger henviser der til sikkerhedsmanualen, der leveres sammen med enheden.

## Tilbehør

Typen af tilgængeligt tilbehør afhænger af høreapparatets type. F.eks.: en fjernbetjening, en streamer, en smartphone-App som fjernbetjening.

Visse typer af høreapparater understøtter CROS- og BiCROS-løsninger for personer med hørehandicap på det ene øre.

Bed om yderligere oplysninger hos din høreapparatspecialist.

## Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser

Driftsbetingelser	Afladning	Opladning
Temperatur	0 til 50 °C	10 til 35 °C
Relativ fugtighed	5 til 93 %	5 til 93 %

Vær opmærksom på følgende forhold i forbindelse med længerevarende transport eller opbevaring:

	Opbevaring	Transport
Temperatur	0 til 25 °C	-20 til 60 °C
Relativ fugtighed	20 til 80 %	5 til 90 %

Vær opmærksom på, at du skal oplade høreapparaterne mindst hver 6. måned. For yderligere oplysninger, se afsnittet "Vedligeholdelse".

For andre dele, som f.eks. opladeren, kan der gælde andre betingelser.



### ADVARSEL

Risiko for skader, brand eller eksplosion under transport.

- ▶ Transportér ladecellerne eller høreapparaterne iht. de lokale forskrifter.

## Information vedrørende bortskaffelse

- ▶ Af hensyn til miljøet bør du ikke bortskaffe ladecellerne eller høreapparaterne med husholdningsaffaldet.
- ▶ Genanvend eller bortskaf ladecellerne eller høreapparaterne iht. de lokale forskrifter.

## Symboler anvendt i dette dokument

---



Angiver en situation, der kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.

---



Angiver mulig beskadigelse af ting.

---



Råd og tips til bedre håndtering af din enhed.

---



"Made for iPhone" betyder, at et elektronisk apparat er udviklet til specielt at blive brugt sammen med en iPhone, og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apple's standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller for dens overholdelse af sikkerhed og regulative standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

## Fejlfinding

### Problem og mulige løsninger

---

Lyden er svag.

---

- Skru op for lydstyrken.
  - Oplad høreapparatet.
  - Rengør eller udskift øreproppen.
- 

Høreapparatet hylér.

---

- Sæt øreproppen i igen, indtil den sidder godt.
  - Skru ned for lydstyrken.
  - Rengør eller udskift øreproppen.
- 

Lyden er forvrænget.

---

- Skru ned for lydstyrken.
  - Oplad høreapparatet.
  - Rengør eller udskift øreproppen.
- 

Høreapparatet giver bipsignaler.

---

- Oplad høreapparatet.
- 

Høreapparatet virker ikke.

---

- Tænd for høreapparatet.
  - Oplad høreapparatet. Vær opmærksom på status-LED'erne på opladeren.
- 

Konsultér din høreapparatspecialist, hvis du oplever yderligere problemer, eller indsend høreapparatet til serviceafdelingen.



## Service og garanti

<b>Serienumre</b>	<b>Apparat</b>	<b>Modtagerenhed</b>
-------------------	----------------	----------------------

Venstre:

Højre:

### Service datoer

1:	4:
----	----

2:	5:
----	----

3:	6:
----	----

### Garanti

Købsdato:

Garantiperiode i måneder:

**Din høreapparatspecialist**







## **Juridisk producent**

Signia GmbH

Henri-Dunant-Strasse 100

91058 Erlangen

Tyskland

Telefon +49 9131 308 0

## **Din kontakt i Danmark**

Sivantos A/S

Ove Gjeddes Vej 9

5220 Odense SØ

Telefon 63 15 40 10

Eurographics A/S eur0208/1/100/0218 | D00175390

03427-99T01-6200 DA-DNK | D00171649

Master Rev01, 01.2018

© 01.2018, Signia GmbH. All rights reserved



**[www.signia.dk](http://www.signia.dk)**