

Motion SP primax

Brugsanvisning



Indhold

Velkommen	4
Dine høreapparater	5
Apparattype	5
Lær dine høreapparater at kende	5
Dele og betegnelser	6
Brugerkontroller	7
Indstillinger	9
Batterier	11
Batteristørrelse og tips til håndtering	12
Udskiftning af batterier	13
Børnelås (tilvalg)	14
Daglig brug	17
Tænd og sluk	17
Anbring og fjern høreapparaterne	19
Justering af lydstyrken	20
Sådan skiftes lytteprogrammet	21
Sådan låses brugerkontrollerne (tilvalg)	22
Yderligere justeringer (tilvalg)	22

Særlige lyttesituationer	23
Indstilling af fokus (tilvalg)	23
Brug af telefon	25
Teleslynger	27
Audioindgang (FM-system)	28
Vedligeholdelse	32
Høreapparater	32
Ørepropper og lydslanger	33
Professionel vedligeholdelse	33
Yderligere oplysninger	34
Sikkerhedsoplysninger	34
Trådløs funktion	34
Tilbehør	34
Symboler anvendt i dette dokument	35
Fejlfinding	35
Service og garanti	37

Velkommen

Tak, fordi du har valgt vores høreapparater. Som det gælder alle nye ting, vil det tage nogen tid at blive fortrolig med dem.

Denne vejledning vil, sammen med eventuel hjælp fra din høreapparatspecialist, hjælpe dig med at forstå de fordele og den forbedrede livskvalitet, dine høreapparater kan give dig.

For at du kan få mest muligt ud af dine høreapparater, anbefales det, at du bærer dem hele dagen, hver dag. Det vil gøre det nemmere for dig at vænne dig til dem.



FORSIGTIG

Det er vigtigt at læse denne brugsanvisning samt sikkerhedshåndbogen grundigt og fuldstændigt.

Følg sikkerhedsoplysningerne for at undgå beskadigelse eller personskader.

Dine høreapparater



Denne brugervejledning beskriver ekstra funktioner, dine høreapparater muligvis har.

Bed din høreapparatspecialist om at markere de funktioner, der er relevante for dine høreapparater.

Apparattype

Dine høreapparater er bag-øret-modeller. En slange leder lyden fra høreapparatet til øret.

Høreapparaterne er også egnet til børn under 3 år eller til personer med en udviklingsalder på under 3 år.

Lær dine høreapparater at kende

Det anbefales, at du bruger lidt tid på at lære dine høreapparater at kende. Med apparaterne i hånden kan du betjene brugerkontrollerne og bemærke dig deres placering på høreapparaterne. Dette vil gøre det lettere for dig at finde og trykke på brugerkontrollerne, når du bærer høreapparaterne.



Hvis du har problemer med at trykke på kontrollerne på dine høreapparater, mens du bærer dem, kan du spørge din høreapparatspecialist om en fjernbetjening som tilbehør.

Dele og betegnelser



-
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Ørekrog | 5 Vippeomskifter
(brugerkontrol) eller flad
forside til pædiatrisk brug
(tilvalg) |
| 2 Mikrofonåbninger | |
| 3 Trykknop
(brugerkontrol) | 6 Batterikammer
(tænd/sluk-kontakt) |
| 4 Lysdiodeindikator | |
-

Din høreapparatspecialist anbringer en lydslange og en individuel øreprop på dit høreapparat.

Brugerkontroller

Med brugerkontrollerne kan du f.eks. justere lydstyrken eller skifte lytteprogram. Dine høreapparater har enten både en trykknop og en vippeomskifter eller kun en trykknop.

Din høreapparatspecialist har programmeret dine ønskede funktioner til brugerkontrollerne.

Brugerkontrol		Venstre	Højre
Trykknop		☐	☐
Vippeomskifter		☐	☐



Du kan også bruge en fjernbetjening eller en smartphone-app til at styre dine apparater med.

Vippeomskifterens funktion	L	R
Kort tryk:		
Lydstyrke op/ned	☐	☐
Lydstyrke for tinnitussignal op/ned	☐	☐
Lydbalance	☐	☐
Fokusvalg (spatialkonfigurator)	☐	☐
L = Venstre (Left), R = Højre (Right)		

Trykknappens funktion	L	R
Tryk kortvarigt:		
Programskifte	☐	☐
Tryk langvarigt:		
Standby/tænd	☐	☐
L = Venstre, R = Højre		

Trykknep- og vippeomskifterfunktion	L	R
Lås/oplås brugerkontrollerne	☐	☐
Læs mere i afsnittet "Sådan låses brugerkontrollerne".		
L = Venstre, R = Højre		

Indstillinger

Lytteprogrammer

1

2

3

4

5

6

Læs mere i afsnittet "Sådan skiftes lytteprogrammet".

Funktioner

- ☐ **Forsinket tænding** gør det muligt at sætte høreapparaterne i uden at få hyletone.
Læs mere i afsnittet "Tænd og sluk".
- ☐ **AutoPhone™** skifter automatisk til telefonprogrammet, når telefonen føres op til øret.
Læs mere i afsnittet "Brug af telefon".
- ☐ **TwinPhone** sender telefonopkaldet til begge ører, når telefonen føres op til det ene øre.
Læs mere i afsnittet "Brug af telefon".

- ☐ **Tinnitusbehandlingsfunktionen** udsender en behagelig lyd, som afleder din opmærksomhed fra din tinnitus.
- ☐ Der er indbygget en **telespole** i apparatet, så det kan oprette forbindelse til teleslynger.
Læs mere i afsnittet "Teleslynger".
- ☐ Funktionen **e2e wireless** muliggør samtidig styring af begge høreapparater.
Læs mere i afsnittet "Trådløs funktion".

Batterier

Når batteriet er ved at være brugt, bliver lyden svagere, og du vil høre et advarselssignal. Den tid, du har, før du skal skifte batteriet, afhænger af batteritypen.

Din høreapparatspecialist kan indstille lysdioden til at vise batteristatus. Høreapparatet skal dog tændes, for at status kan angives:

- Når batteriet er ladet helt op, lyser lysdioden konstant.
- Når batteriet er næsten fladt, blinker lysdioden flere gange, ca. hvert 5. sek., indtil batteriet er helt fladt.
- Når batteriet er fladt, lyser lysdioden ikke længere.



Når batterikammeret er låst, skal du bruge et værktøj for at åbne det. Læs mere i afsnittet "Børnelås".

Batteristørrelse og tips til håndtering

Spørg din høreapparatspecialist om anbefalede batterier.

Batteristørrelse:

○ 675

- Brug altid den korrekte batteristørrelse til dine høreapparater.
- Fjern batterierne, hvis du ikke vil bruge høreapparaterne i flere dage.
- Hav altid reservebatterier med dig.
- Tag brugte batterier ud med det samme, og brug dine lokale genbrugsmuligheder, når du skal bortskaffe batterierne.

Udskiftning af batterier

Fjern batteriet:

- ▶ Åbn batterikammeret.



- ▶ Træk batteriet ud.



Isæt batteriet:

- ▶ Hvis batteriet har en beskyttende mærkat, skal du først fjerne mærkaten, når du er klar til at bruge batteriet.



- ▶ Skub batteriet ind i batterikammeret. Sørg for at "+"-symbolerne på batteriet og kammeret svarer til hinanden (se billedet).



En magnet i batterikammeret sikrer, at batteriet falder mærkbart på plads.

- ▶ Luk forsigtigt batterikammeret. Hvis der føles modstand, er batteriet ikke anbragt korrekt. Prøv ikke at lukke batterikammeret med vold. Det kan beskadige høreapparatet.

Børnelås (tilvalg)


Dine høreapparater kan udstyres med et børnesikkert batterikammer, der kan låses (børnelås). Børnelåsen skal aktiveres af høreapparatspecialisten.

Når børnelåsen er aktiveret, låses batterikammeret automatisk, når det lukkes. Dette forhindrer f.eks. et barn i at fjerne og sluge batteriet.

Hvis du vil åbne et låst batterikammer helt, skal du bruge et værktøj. Dette værktøj medfølger ved leverancen af ethvert høreapparat med batterikammer med børnelås.

Sådan åbnes et låst batterikammer:

- Brug værktøjet til at skubbe den hvide låsetap til modsatte side.
- Hold den på plads, mens du åbner batterikammeret.

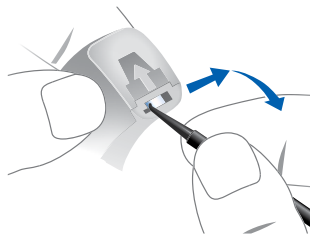

Låse / låse op for batterikammeret

i

Hvis du vil låse eller låse op for batterikammeret, skal du bruge et særligt værktøj.

Din høreapparatspecialist kan låse og låse op for batterikammeret for dig.

Følgende instruktioner er kun til din høreapparatspecialist.

Låsetappens position i batterikammeret angiver, om batterikammeret er låst eller ej.

Det øverste billede viser et ulåst batterikammer. For at låse det, skal høreapparatspecialisten fjerne den fremhævede del.




Det nederste billede viser et låst batterikammer. For at låse det op, skal høreapparatspecialisten montere en deaktivering af børnelås.



Sådan låses batterikammeret:

- ▶ Indsæt spidsen af værktøjet i den lille åbning.
- ▶ Skub / vip den lille plastikdel ud af batterikammeret.

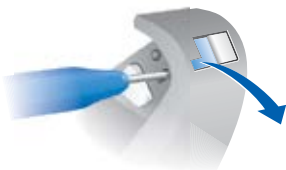

Batterikammeret er låst.

Batterikammeret kan låses op igen af høreapparatspecialisten.

Sådan låses batterikammeret op:

- ▶ Skub låsetappen med deaktiveringen af børnelås til den anden side.
- ▶ Sørg for at deaktiveringen af børnelåsen er sat helt i.
- ▶ Roter skaftet for at brække det af.



Daglig brug

Tænd og sluk

Du kan tænde og slukke for dine høreapparater på følgende måder.

Via batterikammeret:

- Tænd: Luk batterikammeret.

Standardlydstyrken og **-lytteprogrammet** indstilles.

- Sluk: Åben batterikammeret til første stop.

Via trykknep:

- Tænd eller sluk: Tryk på knappen i flere sekunder. Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingerne for dine brugerkontroller.

Når de er tændt, er den **tidligere** brugte indstilling af lydstyrke og lytteprogram fortsat indstillet.

Via fjernbetjening:

- Følg instruktionerne i brugervejledningen til fjernbetjeningen.

Når de er tændt, er den **tidligere** brugte indstilling af lydstyrke og lytteprogram fortsat indstillet.

i

- Når du bærer høreapparaterne, kan et lydsignal indikere, når der tændes eller slukkes for et apparat.
- Din høreapparatspecialist kan indstille lysdioden til at lyse, når der tændes for apparatet.
- Fjern batterierne, hvis du ikke vil bruge høreapparaterne i flere dage.

Når **forsinket tænding** er aktiveret, tænder høreapparaterne først efter en forsinkelse på flere sekunder. Imens kan du sætte høreapparaterne i uden at skulle opleve ubehagelige hyletoner.

"Forsinket tænding" kan aktiveres af din høreapparatspecialist.

Anbring og fjern høreapparaterne


Dine høreapparater er indstillet til dit højre og venstre øre. Farvemærkningerne angiver siden:

- rød markering = højre øre
- blå markering = venstre øre



Anbring høreapparatet:

- ▶ Hold i slangen tæt på øreproppen.
- ▶ Tryk forsigtigt øreproppen ind i øregangen **1**.
- ▶ Drej den let, indtil den sidder godt.
- ▶ Løft høreapparatet op over øret **2**.

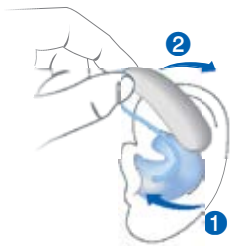


i

- Det kan muligvis hjælpe at sætte **højre** høreapparat i med **højre** hånd og **venstre** høreapparat med **venstre** hånd.
- Hvis du har problemer med at sætte øreproppen i, kan du bruge den anden hånd til forsigtigt at trække øreflippen nedad. Det vil åbne øregangen og gøre det lettere at sætte øreproppen i.

Fjern høreapparatet:

- ▶ Løft høreapparatet op over øret ❶.
- ▶ Hold øreproppen mellem tommel- og pegefinger. Drej forsigtigt øreproppen fremad, mens du trækker den ud ❷.

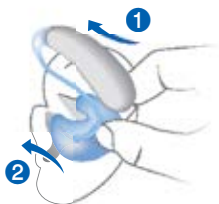

Rengør og aftør høreapparaterne efter brug.
Læs mere i afsnittet "Vedligeholdelse".

Justering af lydstyrken

Dine høreapparater justerer automatisk lydstyrken efter lyttesituationen.

- ▶ Hvis du foretrækker at justere lydstyrken manuelt, skal du trykke kortvarigt på vippeomskifteren eller bruge fjernbetjeningen.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af vippeomskifteren.

Et lydsignal kan indikere en ændring i lydstyrken.

Så snart maksimum- eller minimumlydstyrke er nået, vil du muligvis høre et lydsignal.

Sådan skiftes lytteprogrammet

Høreapparaterne tilpasser automatisk forstærkningen afhængig af lyttesituationen.

Dine høreapparater kan også have flere lytteprogrammer, hvormed du kan ændre lyden efter eget ønske. Et lydssignal kan indikere programændringen.

Desuden kan din høreapparatspecialist indstille lysdioden til at viseprogramskift: Lysdioden blinker én gang, hvis du skifter til program 1 og 2 gange, hvis du skifter til program 2 osv.

- Du kan ændre lytteprogrammet ved at trykke kortvarigt på trykknappen eller bruge fjernbetjeningen.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af dine brugerkontroller. Der henvises til afsnittet "Indstillinger" vedrørende en liste med dine lytteprogrammer.



Hvis AutoPhone eller TwinPhone-funktioner er aktiveret, skifter lytteprogrammet automatisk til et telefonprogram, når telefonen føres op til øret. Læs mere i afsnittet "Brug af telefon".



Din høreapparatspecialist kan indstille dine høreapparater, så de automatisk skifter til audioskoen, hvis denne sættes på. Læs mere i afsnittet "Audioindgang".

Sådan låses brugerkontrollerne (tilvalg)

Du kan låse brugerkontrollerne for at forhindre utilsigtet betjening. Når brugerkontrollerne er låst, er både trykknappen og vippeomskifteren deaktiveret.

- For at låse eller aktivere brugerkontrollerne, skal du trykke vippeomskifteren ned og holde den. Tryk samtidigt på trykknappen på samme høreapparat i 3 sek.

Det er angivet i afsnittet "Brugerkontroller", om denne funktion er indstillet til dit høreapparat.

i

- Hvis du bærer to høreapparater, skal du låse kontrollerne op eller i separat på hvert høreapparat.
- Låsning eller oplåsning kan valgfrit indikeres af en lysdiode, der blinker kortvarigt.
- Når du slukker og tænder for dit høreapparat igen, er tastelåsen i den foregående tilstand.

Yderligere justeringer (tilvalg)

Knapperne på dine høreapparater kan også bruges til at ændre på f.eks. lydbalancen for niveauet for tinnitusbehandlingssignalet. Med lydbalancen kan du justere bas- og diskantlyde efter behov.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af dine brugerkontroller.

Særlige lyttesituationer

Indstilling af fokus (tilvalg)

Hvis du ønsker at fokusere mere direkte på din samtalepartner foran dig, eller hvis du ønsker at lytte til omgivelserne, så giver spatialkonfiguratoren dig kontrol over dine lytteindstillinger.

Du kan vælge forskellige niveauer - fra "fokus på position foran" (billedet til venstre) over "midterposition" (midterste billede) til "lyt til omgivelser" (billedet til højre).



Forudsætninger:

- Du skal bære to høreapparater.
- På det ene af dine høreapparater skal vippeomskifteren indstilles til spatialkonfigurator af din høreapparatspecialist.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af vippeomskifteren.

Du har endnu flere kontrolmuligheder med en egnet smartphone-app.

Manuel indstilling af fokus:

- ▶ Hvis du har flere lytteprogrammer, skal du skifte til lytteprogram 1.
- ▶ Tryk på vippeomskifteren til denne funktion.
Midterniveauet er som standard aktivt.
- ▶ Tryk på den øverste vippeomskifter for at fokusere mere foran dig, eller på den nederste vippeomskifter for at lytte til omgivelserne.

Forlad spatialkonfigurator-funktionen:

- ▶ Skift til minimum eller maksimum niveau.
Et lydsignal kan indikere, at du har skiftet til minimum eller maksimum niveauet.
- ▶ Skift yderligere et trin fremad.
Samme lydsignal som ved ændring af lytteprogram afspilles, hvilket indikerer, at du har forladt spatialkonfigurator-funktionen.

Brug af telefon

Når du taler i telefon, skal du holde telefonen lige over dit øre. Høreapparatet og telefonen skal være tæt på hinanden. Drej telefonen en smule, så øret ikke er helt dækket.



Telefonprogram

Du foretrækker muligvis et bestemt lydniveau, når du taler i telefon. Bed din høreapparatspecialist om at indstille et telefonprogram.

- Skift til telefonprogrammet, når du taler i telefon, eller brug den automatiske programomskifter.

Det er angivet i afsnittet "Indstillinger", om der er indstillet et telefonprogram eller den automatiske programomskifter bruges til dine høreapparater.

Automatisk programsifter (AutoPhone eller TwinPhone)

Dit høreapparat kan **automatisk** vælge telefonprogrammet, når du holder telefonen op til høreapparatet. TwinPhone sender endda opringningen til begge ører. Når du er færdig med at tale i telefon, skal du tage telefonen væk fra høreapparatet, hvorefter mikrofonfunktionen aktiveres igen.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du bede din høreapparatspecialist om at gøre følgende:

- Aktivér AutoPhone eller TwinPhone-funktionen.
- Kontrollér magnetfeltet for din telefon.

Med det automatiske programsifte vil dit høreapparat registrere telefonens magnetfelt. Ikke alle telefoner danner et magnetfelt, der er tilstrækkeligt kraftigt for at aktivere denne funktion. I dette tilfælde kan du bruge AutoPhone-magneten, der fås som tilbehør, og montere den på telefonen.

Der henvises til brugervejledningen til AutoPhone-magneten for oplysninger om, hvordan man anbringer magneten.



BEMÆRK

Brug kun den godkendte AutoPhone-magnet.
Spørg din høreapparatspecialist om dette tilbehør.

Teleslynger

Nogle telefoner samt offentlige steder som f.eks. biografer har mulighed for at sende lydsignaler (musik og tale) via en teleslynge. Med dette system kan dine høreapparater modtage det ønskede signal direkte - uden distraherende støj fra omgivelserne.

Du kan som regel genkende teleslynger ved hjælp af visse symboler.



Bed din høreapparatspecialist om at indstille et telespoleprogram.

- Skift til telespoleprogrammet, når du er på et sted med teleslynge.

Det er angivet i afsnittet "Indstillinger", om et telespoleprogram er indstillet til dine høreapparater.

Telespoleprogram og fjernbetjening



BEMÆRK

For apparater med trådløs forbindelse:

Når telespoleprogrammet er aktiveret, kan fjernbetjeningen forårsage en pulserende støj.

- Brug kun fjernbetjeningen, når afstanden er over 10 cm.

Audioindgang (FM-system)

Med en audioindgang kan du tilslutte dine høreapparater til et FM-system. En FM-system består af en sender og en modtager. Systemet registrerer tale ved talens kilde (via en separat mikrofon) og sender lyden direkte til høreapparaterne.

Signalet er tydeligere og upåvirket af dårlig akustik i rummet. Dette kan være nyttigt for voksne i vanskelige lyttesituationer samt for børn i klasseværelser.

De fleste FM-systemer giver mulighed for sammenkobling med lydapparater som f.eks. en MP3-afspiller.

Bemærkninger:

- Hvis du vil bruge en audiosko, kræves et særligt batterikammer. Bed din høreapparatspecialist om at udskifte batterikammeret.
- Bed din høreapparatspecialist om at indstille dine høreapparater til f.eks.:
 - Justér blandingen af audioindgang-signal med omgivende lyde.
 - Konfigurer dine høreapparater, så de automatisk skifter til audioskoen, hvis denne sættes på.
- Brug kun en dertil egnet audiosko. Spørg din høreapparatspecialist om dette tilbehør.



ADVARSEL


Risiko for elektrisk stød!

- Opret kun forbindelse til enheder, der overholder IEC 60065, IEC-standarden for lyd-, video- og andre elektroniske enheder.



BEMÆRK

- Hold godt fast i audioskoen, når du fjerner FM-modtageren.

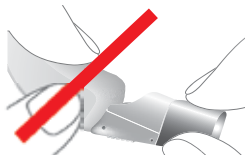


Anbring audioskoen


- ▶ Åbn batterikammeret.

- ▶ Træk dækslet ud.

Dækslets form afhænger af høreapparatets **type**.

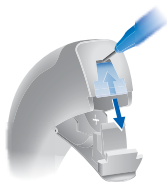

- ▶ Skyd audioskoen ind.

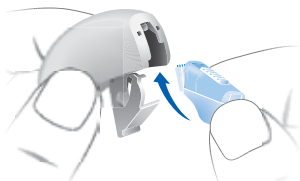

- ▶ Sørg for, at den klikker på plads.




- ▶ Luk batterikammeret.


Fjern audioskoen

Når audioskoen ikke er monteret, kan du påsætte et dæksel, der forhindrer snavs og støv i at trænge ind i kabinettet.


- Åbn batterikammeret.

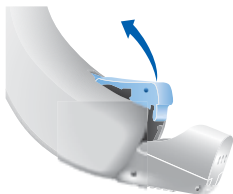

- Træk skyderen på audioskoen tilbage, og flyt den samtidig nedad for at tage den af apparatet.

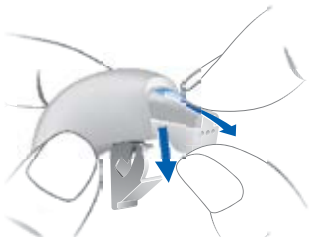

- Glid dækslet på plads i pilens retning.
Dækslets form afhænger af høreapparatets type.

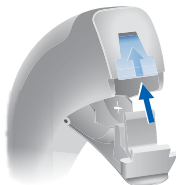

- Luk batterikammeret.

Vedligeholdelse

For at undgå beskadigelse er det vigtigt at passe godt på høreapparaterne og overholde nogle få grundregler, men de bliver hurtigt en vane.

Høreapparater

Tørring og opbevaring

- ▶ Lad dine høreapparater tørre natten over.
- ▶ Hvis høreapparaterne ikke bruges i længere tid, bør de opbevares i et tørt miljø med åbent batterikammer, og batterierne taget ud.
- ▶ Bed om yderligere oplysninger hos din høreapparatspecialist.

Rengøring

Dine høreapparater har et beskyttende belægning. Hvis de ikke rengøres jævnligt, kan du dog beskadige dine høreapparater eller forårsage personskader.

- ▶ Rengør dine høreapparater dagligt med en blød, tør klud.
- ▶ Brug aldrig rindende vand, og kom aldrig apparaterne i vand.
- ▶ Tryk aldrig på apparaterne, når du rengør dem.



- Spørg din høreapparatspecialist efter anbefalede rengøringsprodukter, særlige vedligeholdelsessæt eller yderligere oplysninger om, hvordan du holder dine høreapparater i god stand.

Ørepropper og lydslanger

Der kan samle sig ørevoks på ørepropperne. Det kan påvirke lyd kvaliteten. Rengør ørepropperne dagligt.

Bed din høreapparatspecialist om at rengøre slangerne eller udskifte ørepropperne og lydslangerne ved behov.

Rengøring af øreproppen

- Rengør øreproppen med en blød og tør klud umiddelbart efter, at du har fjernet øreproppen fra øret.

Dette vil forhindre, at ørevoksen tørrer ind og bliver hård.

- Brug aldrig rindende vand, og kom aldrig øreproppen i vand.

Professionel vedligeholdelse

Din høreapparatspecialist kan muligvis hjælpe dig med en grundig, professionel rengøring og vedligeholdelse.

Individuelle ørepropper og ørevoksfiltere bør udskiftes efter behov af en høreapparatspecialist.

Bed din høreapparatspecialist om at få individuel anbefaling af vedligeholdelsesintervaller samt anden hjælp.

Yderligere oplysninger

Sikkerhedsoplysninger

For yderligere sikkerhedsoplysninger henvises der til sikkerhedsmanualen, der leveres sammen med enheden.

Trådløs funktion

Dine høreapparater er udstyret med trådløs funktion. Dette giver mulighed for at synkronisere mellem dine to høreapparater:

- Hvis du skifter program eller ændrer lydstyrken i det ene apparat, ændres det andet automatisk.
- Begge høreapparater tilpasser sig automatisk samtidigt til lyttesituationen.

Den trådløse funktion tillader brug af fjernbetjening.

Tilbehør

Typen af tilgængeligt tilbehør afhænger af høreapparatets type, det kan f.eks. være en fjernbetjening, en streamer eller en smartphone-app som fjernbetjening.

Visse typer af høreapparater understøtter CROS- og BiCROS-løsninger for personer, som er døve på det ene øre og med normal hørelse eller høretab på det andet øre.

Bed om yderligere oplysninger hos din høreapparatspecialist.

Symboler anvendt i dette dokument



Angiver en situation, der kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.



Angiver mulig beskadigelse af ting.



Råd og tips til bedre håndtering af din enhed.

Fejlfinding

Problem og mulige løsninger

Lyden er svag.

- Skru op for lydstyrken.
 - Udskift det brugte batteri.
 - Rengør øreproppen.
-

Høreapparatet hylér.

- Sæt øreproppen i igen, indtil den sidder godt.
 - Skru ned for lydstyrken.
 - Rengør øreproppen.
-

Lyden er forvrænget.

- Skru ned for lydstyrken.
 - Udskift det brugte batteri.
 - Rengør øreproppen.
-

Høreapparatet giver bipsignaler.

- Udskift det brugte batteri.
-

Problem og mulige løsninger

Høreapparatet virker ikke.

- Tænd for høreapparatet.
 - Luk forsigtigt batterikammeret helt.
 - Udskift det brugte batteri.
 - Sørg for, at batteriet er sat korrekt i.
 - Forsinket tænding er aktiv.
- Vent i nogle sekunder, og kontrollér igen.
-

Konsultér din høreapparatspecialist, hvis du oplever yderligere problemer, eller indsend høreapparatet til serviceafdelingen.

Service og garanti

Serienumre

Venstre:

Højre:

Servicedatoer

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garanti

Dato for tilpasning:

Garantiperiode i måneder:

Din høreapparatspecialist

[illegible]



Juridisk producent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Telefon +49 9131 308 0

Din kontakt i Danmark

Sivantos A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 00

Order/Item No. 109 625 73 | D00161216
Document No. 03119-99T04-6200 DA-DNK | D00158821
Master Rev04, 04.2019
© 08.2019, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia.dk