

Pure Charge&Go X

Brugsanvisning



Made for

iPhone | iPad | iPod

Indhold

Velkommen	4
<hr/>	
Dine høreapparater	5
<hr/>	
Apparattype	5
Lær dine høreapparater at kende	6
Dele og betegnelser	7
Lytteprogrammer	10
Funktioner	10
Daglig brug	11
<hr/>	
Opladning	11
Tænd og sluk	12
Anbring og fjern høreapparaterne	14
Justering af lydstyrken	18
Sådan skiftes lytteprogrammet	19
Yderligere justeringer (tilvalg)	19
Særlige lyttesituationer	20
<hr/>	
Brug af telefon	20
Lydstreaming med iPhone	20
Flyrejser	21
Vedligeholdelse	22
<hr/>	
Høreapparater	22
Ørepropper	24
Professionel vedligeholdelse	26

Vigtige sikkerhedsoplysninger	27
Yderligere oplysninger	29
Sikkerhedsoplysninger	29
Tilbehør	29
Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser	29
Information vedrørende bortskaffelse	31
Symboler anvendt i dette dokument	31
Fejlfinding	32
Service og garanti	33

Velkommen

Tak, fordi du har valgt vores høreapparater. Som det gælder alle nye ting, vil det tage nogen tid at blive fortrolig med dem.

Denne vejledning vil, sammen med eventuel hjælp fra din høreapparatspecialist, hjælpe dig med at forstå de fordele og den forbedrede livskvalitet, dine høreapparater kan give dig.

For at du kan få mest muligt ud af dine høreapparater, anbefales det, at du bærer dem hele dagen, hver dag. Det vil gøre det nemmere for dig at vænne dig til dem.



FORSIGTIG

Det er vigtigt at læse denne brugsanvisning samt sikkerhedshåndbogen grundigt og fuldstændigt. Følg sikkerhedsoplysningerne for at undgå beskadigelse eller personskader.



Lad høreapparaterne helt op, inden du anvender dem første gang. Følg instruktionerne i opladerens brugsanvisning.

Dine høreapparater



Denne brugervejledning beskriver ekstra funktioner, dine høreapparater muligvis har.

Bed din høreapparatspecialist om at markere de funktioner, der er relevante for dine høreapparater.

Apparattype

Dine høreapparater er en RIC-model (Receiver-in-Canal eller på dansk: højtaler i øret). Højtaleren er anbragt i øregangen og er forbundet med høreapparatet via en højtalerforbindelse. Apparaterne er ikke beregnet til børn under 3 år eller til personer med en udviklingsalder på under 3 år.

Der er fast indbygget en ladebattericelle (genopladeligt litium-ion-batteri) i dit høreapparat. Dette gør det nemt at lade op med vores induktive oplader.

Den trådløse funktionalitet muliggør avancerede lydfunktioner og synkronisering mellem dine to høreapparater.

Dine høreapparater har Bluetooth® low energy*-teknologi, der giver mulighed for nem udveksling af data med din smartphone og problemfri lydstreaming med din iPhone**.

* Bluetooth-varemærket og -logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af den juridiske producent af dette produkt sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

** iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er indregistreret i USA og andre lande.


Lær dine høreapparater at kende

Det anbefales, at du bruger lidt tid på at lære dine høreapparater at kende. Med apparaterne i hånden kan du betjene brugerkontrollerne og bemærke dig deres placering på høreapparaterne. Dette vil gøre det lettere for dig at finde og trykke på brugerkontrollerne, når du bærer høreapparaterne.

i

Hvis du har problemer med at trykke på knapperne på høreapparaterne, mens du har dem på, kan du spørge din høreapparatspecialist, om det er muligt at bruge en fjernbetjening eller en smartphone-app til at betjene dine høreapparater med.

Dele og betegnelser

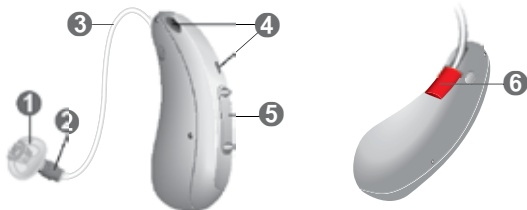

1 Øreprop

2 Højtaler





3 Højtalerforbindelse

4 Mikrofonåbninger

5 Vippeomskifter
(brugerkontrol,
tænd/sluk-funktion)



6 Sideangivelse
(rød = højre øre,
blå = venstre øre) og
højtalerforbindelse

Du kan anvende standardpropper eller individuelle ørepropper:

Standardpropper	Størrelse
<input type="radio"/>  Click Sleeve (åben eller lukket)	
<input type="radio"/>  Click Dome™ (åben eller lukket)	
<input type="radio"/>  Click Dome halvåben	
<input type="radio"/>  Click Dome dobbelt	

Du kan let udskifte standardpropperne. Læs mere i afsnittet "Vedligeholdelse".

Individuelle ørepropper

<input type="radio"/>  Personlig skal	
<input type="radio"/>  Click Prop	

Brugerkontroller

Med vippeomskifteren kan du f.eks. skifte lytteprogram eller ændre lydstyrke. Din høreapparatspecialist har lagt dine ønskede funktioner ind i vippeomskifteren.

Vippeomskifterens funktion	L	R
Kort tryk:		
Lytteprogram op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke for tinnitusignal op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke for tinnitusignal ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV-streaming til/fra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tryk i ca. 2 sekunder:		
Lytteprogram op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke for tinnitusignal op	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lydstyrke for tinnitusignal ned	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV-streaming til/fra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tryk i mere end 3 sekunder:		
Tænd/sluk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = venstre, R = højre



Du kan også bruge en fjernbetjening til at ændre lytteprogrammer eller justere lydstyrken i dine høreapparater med. Du har endnu flere kontrolmuligheder med vores smartphone-app.

Lytteprogrammer

1

2

3

4

5

6

Læs mere i afsnittet "Sådan skiftes lytteprogrammet".

Funktioner



Tinnitusbehandlingsfunktionen udsender en behagelig lyd, som afleder din opmærksomhed fra din tinnitus.

Daglig brug

For at sikre komfortabel og nem brug af dine høreapparater er de udstyret med indbygget brugerkontrol. Derudover tilbyder vi en app til Android og iPhone, som gør håndteringen af dine høreapparater endnu nemmere. Kontakt din høreapparatspecialist vedrørende download og installation af smartphone-appen.

Opladning

Anbring dine høreapparater i opladeren.

- Følg instruktionerne i brugsanvisningen til opladeren. Her kan du også finde gode tips til opladning.

Indikation af lavt strømniveau

Du hører et alarmsignal, der angiver, at ladecellen er ved at være flad. Signalet gentages hvert 20. minut. Afhængigt af brugen af dine høreapparater har du ca. 1,5 time til at oplade dine høreapparater, før de holder op med at virke.

Bemærk, at ladecellens driftstid reduceres, hvis der bruges for mange funktioner samtidigt.



Tænd og sluk

Du kan tænde og slukke for dine høreapparater på følgende måder.

Via oplader:

- ▶ Tænd: Tag apparaterne ud af opladeren.
Opstartsmelodien afspilles i dine høreapparater.
Standardlydstyrken og -lytteprogrammet indstilles.
- ▶ Sluk: Sæt høreapparaterne i opladeren.

Bemærk, at opladeren skal være tilsluttet strømforsyningen. Se opladerens brugsanvisning for yderligere oplysninger.

Brug af vippeomskifteren:

- ▶ Tænd: Tryk på den nederste del af vippeomskifteren, og hold den inde, indtil startmelodien afspilles. Slip vippeomskifteren, mens melodien afspilles.



Standardlydstyrken og -lytteprogrammet indstilles.

- ▶ Sluk: Tryk på den øverste eller nederste del af vippeomskifteren, og hold den inde i flere sekunder. En melodi for slukning afspilles.



Se også tips til opladning i brugsanvisningen til opladeren.

Skift til standby-tilstand

Du kan sætte dine høreapparater på standby-tilstand via fjernbetjening eller en smartphone-app. Dette slukker for høreapparaternes lyd. Når du tænder for høreapparaterne igen, indstilles den **tidligere** anvendte lydstyrke og lytteprogrammet.

Bemærk:

- I standby-tilstand er høreapparaterne **ikke** slukket helt. De forbruger stadig en smule strøm.

Derfor anbefaler vi kun at anvende standby-tilstand i en kort periode.

- Hvis du vil tænde for høreapparaterne igen, og ikke har fjernbetjeningen eller appen ved hånden: Sluk for høreapparaterne, og tænd dem derefter igen (med vippeomskifteren eller ved at sætte dem kortvarigt i opladeren, indtil en eller flere LED'er begynder at lyse orange). I dette tilfælde indstilles **standard**lydstyrken og -lytteprogrammet.

Anbring og fjern høreapparaterne

Dine høreapparater er indstillet til dit højre og venstre øre. Farvemærkningerne angiver siden:


- rød markering = højre øre
- blå markering = venstre øre




Isæt høreapparatet:

- ▶ Når der anvendes Click Sleeves, skal man være opmærksom på, at den buede del af Click Sleeve følger højttalerforbindelsens buede del.

Rigtigt:

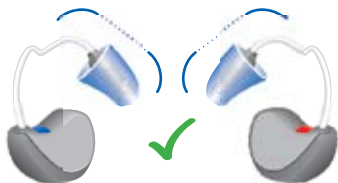

Forkert:

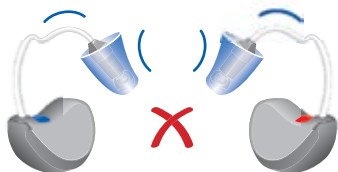


- ▶ Hold højtalerforbindelsen i den buede del, tættest ved øreproppen.
- ▶ Tryk forsigtigt øreproppen ind i øregangen ①.

- ▶ Drej den let, indtil den sidder godt.

Åbn og luk munden for at undgå, at der ophobes luft i øregangen.

- ▶ Løft høreapparatet op over øret ②.

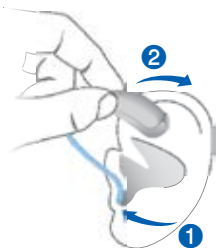

FORSIGTIG

Risiko for skader!

- ▶ Sæt øreproppen omhyggeligt, og ikke for dybt, i øret.

i

- Det kan muligvis hjælpe at sætte **højre** høreapparat i med **højre** hånd og **venstre** høreapparat i med **venstre** hånd.
- Hvis du har problemer med at sætte øreproppen i, kan du bruge den anden hånd til forsigtigt at trække øreflippen nedad. Det vil åbne øregangen og gøre det lettere at sætte øreproppen i.


Concha-låsen hjælper med at holde øreproppen på plads i øret. Sådan anbringes concha-låsen:

- ▶ Bøj concha-låsen, og anbring den forsigtigt nederst i øret (se billedet).



Fjern høreapparatet:

- ▶ Løft høreapparatet, og placer det foran øret ①.
- ▶ Hvis dit høreapparat er udstyret med en personlig skal eller en Click Prop, fjerner du den ved at trække udad i den lille udtrækssnor.

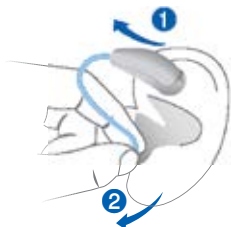

- ▶ Ved alle andre ørepropper: Tag fat i højttaleren i øregangen med to fingre, og træk den forsigtigt ud ②.
Træk ikke i højttalerforbindelsen.



FORSIGTIG

Risiko for skader!

- ▶ I meget sjældne tilfælde kan øreproppen blive siddende i øret, når du tager høreapparatet af. Sker dette, skal du få den fjernet hos en læge.

Rengør og aftør høreapparaterne efter brug. Læs mere i afsnittet "Vedligeholdelse".

Justering af lydstyrken

Dine høreapparater justerer automatisk lydstyrken efter lyttesituationen.

- ▶ Hvis du foretrækker manuel justering af lydstyrken, skal du trykke på den øverste del af vippeomskifteren for at øge lydstyrken og på den nederste del for at sænke lydstyrken.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" for oplysninger om indstilling af vippeomskifteren.

Du kan vælge at lade et signal indikere en ændring i lydstyrken. Du kan endvidere vælge at lade et signal indikere, så snart maksimum- eller minimumlydstyrken er nået.

Sådan skiftes lytteprogrammet

Høreapparaterne tilpasser automatisk forstærkningen afhængig af lyttesituationen.

Dine høreapparater kan også have flere lytteprogrammer, hvormed du kan ændre lyden efter eget ønske. Et lydsignal kan indikere programændringen.

- ▶ Du kan ændre lytteprogrammet ved at trykke kortvarigt på vippeomskifteren.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstilling af vippeomskifteren. Der henvises til afsnittet "Lytteprogrammer" vedrørende en liste med dine lytteprogrammer.

Standardlydstyrken anvendes.

Yderligere justeringer (tilvalg)

Du kan også bruge høreapparatets kontrolelementer til at indstille andre funktioner, for eksempel tinnitusbehandlingssignalets niveau.

Der henvises til afsnittet "Brugerkontroller" vedrørende indstillingen af dine brugerkontroller.

Særlige lyttesituationer

Brug af telefon

Når du taler i telefon, skal du holde telefonen lige over dit øre. Høreapparatet og telefonen skal være tæt på hinanden. Drej telefonen en smule, så øret ikke er helt dækket.



Telefonprogram

Du foretrækker muligvis et bestemt lydniveau, når du taler i telefon. Bed din høreapparatspecialist om at indstille et telefonprogram.

- Skift til telefonprogrammet, når du taler i telefon.

Det er angivet i afsnittet "Lytteprogrammer", om et telefonprogram er indstillet til dine høreapparater.

Lydstreaming med iPhone

Dine høreapparater er **Made for iPhone**-høreapparater. Dette betyder, at du kan bruge dine høreapparater til at modtage telefonopkald og lytte til musik direkte fra din iPhone.

For flere oplysninger om kompatible iOS-enheder, parring, lydstreaming og andre nyttige funktioner bedes du kontakte din høreapparatspecialist eller se på vores hjemmeside **www.signia.dk**.

Flyrejser

Det er tilladt at medbringe opladeren i både håndbagage og indchecket bagage.

Du skal slukke for høreapparaternes Bluetooth under flyrejser:

- Sluk for høreapparaterne (se på side 12 i denne vejledning)
- Sæt din smartphone i flytilstand
- Tænd for dine apparater igen (se på side 12 i denne vejledning)

Dine høreapparater vil lede efter din smartphone i 2 minutter, og når de ikke kan finde den, vil de slukke for deres Bluetooth-modul automatisk.

Når det er sikkert at tænde Bluetooth igen:

- Sluk og tænd høreapparaterne igen
- Tag din smartphone ud af flytilstand

Høreapparater og smartphone vil automatisk etablere forbindelse.

Vedligeholdelse

For at undgå beskadigelse er det vigtigt at passe godt på høreapparaterne og overholde nogle få grundregler, men de bliver hurtigt en vane.

Høreapparater

Rengøring

Dine høreapparater har en beskyttende belægning. Hvis de ikke rengøres jævnligt, kan du dog beskadige dine høreapparater eller forårsage personskader.

- ▶ Rengør dine høreapparater dagligt med en blød, tør klud.
- ▶ Brug aldrig rindende vand, og kom aldrig apparaterne i vand.
- ▶ Tryk aldrig på apparaterne, når du rengør dem.
- ▶ Spørg din høreapparatspecialist efter anbefalede rengøringsprodukter, særlige vedligeholdelsessæt eller yderligere oplysninger om, hvordan du holder dine høreapparater i god stand.



Tørring

Din oplader tørrer høreapparaterne, mens de oplades. Spørg din høreapparatspecialist om anbefalede tørreprodukter og individuelle instruktioner om, hvordan du tørrer dine høreapparater.

Opbevaring

- Kortvarig opbevaring (op til flere dage): Sluk for høreapparaterne med vippeomskifteren, eller sæt dem i opladeren.

Opladeren skal være tilsluttet strømforsyningen. Hvis opladeren ikke er tilsluttet strømforsyningen, og du sætter høreapparaterne i opladeren, slukkes høreapparaterne **ikke**.

Vær opmærksom på, at når du slukker høreapparaterne med en fjernbetjening eller en smartphone-app, slukkes høreapparaterne **ikke** helt. De er på standby og forbruger stadig en smule strøm.

- Langvarig opbevaring (uger, måneder...): Lad først dine høreapparater fuldt op. Sluk for dem på vippeomskifteren, før de lægges til side. Vi anbefaler, at du anvender tørreprodukter under opbevaringen af høreapparaterne.

Oplad dine høreapparater hver sjette måned for at undgå total afladning af ladecellen. Totalt afladede ladeceller kan ikke oplades igen og skal udskiftes. Vi anbefaler dog at genoplade hyppigere end hver sjette måned.

Overhold opbevaringsbetingelserne i afsnittet "Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser".


Ørepropper

Rengøring

Der kan samle sig ørevoks på ørepropperne. Det kan påvirke lyd kvaliteten. Rengør ørepropperne dagligt.

For alle typer ørepropper:

- ▶ Rengør øreproppen med en blød og tør klud umiddelbart efter, at du har fjernet øreproppen fra øret.

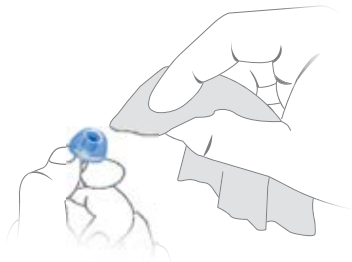

Dette vil forhindre, at ørevoksen tørrer og bliver hård.

Til Click Domes eller Click Sleeves:

- ▶ Klem spidsen på øreproppen for at fjerne indtørret ørevoks. Rengør som vist ovenfor.




Udskiftning

Udskift almindelige ørepropper ca. hver 3. måned. Udskift dem tidligere, hvis de får revner eller andre forandringer. Proceduren for udskiftning af almindelige ørepropper afhænger af deres type. I afsnittet "Dele og betegnelser" har din høreapparatspecialist markeret den type øreprop, du har.

Udskiftning af Click Domes

- ▶ For at fjerne den gamle Click Dome kan du bruge afmonteringsværktøjet eller følge instruktionerne på emballagen til Click Domes. Pas på ikke at trække i ledningen til højttaleren.

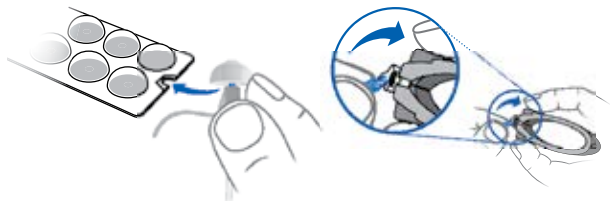

Afmonteringsværktøjet fås som tilbehør.

- ▶ Vær særlig omhyggelig med, at den nye Click Dome klikker på plads.
- ▶ Kontrollér, at den nye Click Dome sidder sikkert fast.



Udskiftning af Click Sleeves

- ▶ Vend Click Sleeve med vrangen udad.
- ▶ Tag fat i Click Sleeve og højtaler (ikke højtalerens ledning) med dine fingre, og træk Click Sleeve af.
- ▶ Vær særligt omhyggelig med, at den nye Click Sleeve klikker på plads.



Professionel vedligeholdelse

Din høreapparatspecialist kan muligvis hjælpe dig med en grundig, professionel rengøring og vedligeholdelse.

Individuelle ørepropper bør udskiftes efter behov af en høreapparatspecialist. Voksfiltere skal udskiftes regelmæssigt (se vejledningen der følger med voksfilterne).

Bed din høreapparatspecialist om at få individuel anbefaling af vedligeholdelsesintervaller samt anden hjælp.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om ladezellen. Yderligere sikkerhedsoplysninger findes i sikkerhedsmanualen, der leveres sammen med høreapparaterne.



ADVARSEL

Høreapparatet har en indbygget lade-celle (genopladeligt litium-ion-batteri). Forkert brug af lade-cellen eller høreapparatet kan medføre, at lade-cellen går i stykker.

Risiko for personskade, kemisk fare, brand eller eksplosion!

- ▶ Følg betjeningsvejledningen. Se afsnittet "Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser".
- ▶ Vær særlig opmærksom på at beskytte dine høreapparater mod ekstrem varme (f.eks. ild, mikrobølgeovne, induktionsovne eller andre felter med kraftig induktion) og sollys. Undlad at knuse, kortslutte, afbrænde eller opvarme lade-cellen eller høreapparatet til over 100 °C.
- ▶ Oplad kun dine høreapparater i den godkendte oplader. Kontakt din høreapparatspecialist for at få hjælp.
- ▶ Lade-cellen må ikke skilles ad.



ADVARSEL

Forkert brug af ladecellen eller høreapparatet kan medføre, at ladecellen går i stykker.

Risiko for personskade, kemisk fare, brand eller eksplosion!

Udskiftning og reparation skal udføres af et servicecenter. Derfor:

- ▶ Reparér eller udskift ikke ladecellen selv.
- ▶ Brug ikke høreapparaterne, hvis deres ydeevne reduceres betydeligt efter opladning.
- ▶ I det usandsynlige tilfælde, at en ladecelle lækker, brister eller eksploderer:
 - Hold alle brændbare materialer væk.
 - Skyl straks med vand, hvis elektrolytten kommer i kontakt med huden, øjnene eller andre dele af kroppen. Søg læge.

Hvis nogen af ovennævnte situationer optræder, skal du indlevere dine høreapparater til din høreapparatspecialist.

Yderligere oplysninger

Sikkerhedsoplysninger

For yderligere sikkerhedsoplysninger henvises der til sikkerhedsmanualen, der leveres sammen med enheden.

Tilbehør

Du kan bruge en smartphone-app til bekvem fjernbetjening af høreapparaterne. Appen muliggør ligeledes deaktivering af signallyde, oprettelse af individuelle lydprofiler og mange flere funktioner.

Du kan også bruge en fjernbetjening.

Bed om yderligere oplysninger hos din høreapparatspecialist.

Drifts-, transport- og opbevaringsbetingelser

Høreapparaterne fungerer under følgende miljøforhold (gælder også når du ikke bruger høreapparaterne):

Driftsbetingelser	Afladning	Opladning
Temperatur	0 til 45 °C	-10 til 30 °C
Relativ luftfugtighed	5 til 93 %	5 til 93 %
Atmosfærisk tryk	700 til 1.060 hPa	700 til 1.060 hPa

Vær opmærksom på følgende forhold i forbindelse med længerevarende transport eller opbevaring:

	Opbevaring	Transport
Temperatur (anbefalet)	10 til 25 °C	-20 til 60 °C
Temperatur	0 til 40 °C	-20 til 60 °C
Relativ luftfugtighed (anbefalet)	20 til 80 %	5 til 90 %
Relativ luftfugtighed	10 til 80 %	5 til 90 %
Atmosfærisk tryk	700 til 1.060 hPa	700 til 1.060 hPa

Vær opmærksom på, at du skal oplade høreapparaterne mindst hver sjette måned. Vi anbefaler at oplade høreapparaterne hver tredje måned. Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Vedligeholdelse".

For andre dele, f.eks. opladeren, kan der gælde andre betingelser.



ADVARSEL

Risiko for skader, brand eller eksplosion under transport.

- ▶ Transportér ladecellerne eller høreapparaterne iht. de lokale forskrifter.

Information vedrørende bortskaffelse

- ▶ Af hensyn til miljøet bør du ikke bortskaffe ladecellerne eller høreapparaterne med husholdningsaffaldet.
- ▶ Genanvend eller bortskaf ladecellerne eller høreapparaterne iht. de lokale forskrifter.

Symboler anvendt i dette dokument



Angiver en situation, der kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader.



Angiver mulig beskadigelse af ting.



Råd og tips til bedre håndtering af din enhed.

Made for

iPhone | iPad | iPod

"Made for iPhone", "Made for iPad" og "Made for iPod" betyder, at en elektronisk enhed er designet til at oprette forbindelse specifikt til henholdsvis iPhone, iPad eller iPod, og det er blevet certificeret af udvikleren, at den overholder Apples krav til ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller for dens overholdelse af sikkerhed og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af denne enhed sammen med iPhone, iPad eller iPod kan påvirke den trådløse ydeevne.

Fejlfinding

Problem og mulige løsninger

Lyden er svag.

- Skru op for lydstyrken.
 - Oplad høreapparatet.
 - Rengør eller udskift øreproppen.
-

Høreapparatet hylér.

- Sæt øreproppen i igen, indtil den sidder godt.
 - Skru ned for lydstyrken.
 - Rengør eller udskift øreproppen.
-

Lyden er forvrænget.

- Skru ned for lydstyrken.
 - Oplad høreapparatet.
 - Rengør eller udskift øreproppen.
-

Høreapparatet giver bipsignaler.

- Oplad høreapparatet.
-

Høreapparatet virker ikke.

- Tænd for høreapparatet.
 - Oplad høreapparatet. Vær opmærksom på status-LED'erne på opladeren.
-

Konsultér din høreapparatspecialist, hvis du oplever yderligere problemer, eller indsend høreapparatet til serviceafdelingen.

Service og garanti

Serienumre	Apparat	Højtalerenhed
-------------------	----------------	----------------------

Venstre:

Højre:

Service datoer

1:	4:
----	----

2:	5:
----	----

3:	6:
----	----

Garanti

Dato for tilpasning:

Garantiperiode i måneder:

Din høreapparatspecialist



Juridisk producent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Telefon +49 9131 308 0

Din kontakt i Danmark

Sivantos A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 00

Order/Item No. 109 721 36 | D00200955
Document No. 03998-99T01-6200 DA-DNK | D00194616
Master Rev01, 09.2019
© 10.2019, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia.dk